

AR إرشادات السلامة
 أمعن في قراءة تعليمات الاستخدام، ولا سيما إرشادات السلامة، قبل استخدام الجهاز، واحفظ تعليمات الاستخدام للاستعانة بها مستقبلاً. إذا أعطيت الجهاز لشخص آخر، يجب أن تعطيه تعليمات الاستخدام هذه أيضًا.



- لا تستخدم الجهاز إلا لغرض المُخصَّص له وفقًا لتعليمات الاستخدام.
- في حالة إساءة الاستخدام، ينتهي الحق في المطالبة بالضمان.
- الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري.
- يمكن السماح للأطفال بدءًا من عمر 8 سنوات والأفراد الذين يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو ذهنية أو يعانون من نقص الخبرة والمعرفة اللازمة باستخدام هذا الجهاز تحت إشراف وملاحظة مستمرة، وذلك بعد أن يتم توعيتهم بالقدر الكافي بسبل الاستخدام الآمن للجهاز والمخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج جراء الاستخدام.
- يجب الإشراف على الأطفال؛ لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- لا يُسمح للأطفال بإجراء أعمال التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم دون مراقبة.
- الجهاز غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.
- يرجى استشارة الطبيب أولاً، في حالة ارتداء منظم لضربات القلب أو وجود مفاصل صناعية أو أجهزة إلكترونية مزروعة في الجسم.

- لا يُنصح باستخدام الجهاز للأشخاص الذين يعانون من الصرع أو مرض القلب.
- لا تستخدمي الجهاز إلا على شعر جاف ومُشط.
- لا تستخدمي الجهاز على جلد مُتشقّق أو مجروح.
- أحرصى على تجنُّب التلامس المباشر مع الأذنين والعينين والقم، عند استخدام مشط القمل الكهربائي. يمكن أن يؤدي لمس الإنسان المعدنية المشط إلى حدوث نبضات كهربائية مؤلمة، لكنها غير ضارة.**

- للمشط أطراف مستديرة على شكل خُرزة في واحدة من كل سِنِّتين ❸. فتأكدى قبل كل استخدام من عدم فقدان أو تلف أي منها. وإلا فلا يجوز مواصلة استخدام مشط القمل.
- في حالة حدوث أعطال، لا تُصلحي الجهاز بنفسك؛ لأن ذلك سوف يتسبب في إلغاء أي حق في المطالبة بالضمان. لا تعهدي بأعمال الإصلاح إلا لِمراكز الخدمة المعتمدة.
- لا يجوز لك أن تُجرى بنفسك أي أعمال على الجهاز سوى أعمال التنظيف.
- أبقي الجهاز بعيدًا عن الأسطح الساخنة وأحميه من أشعة الشمس المباشرة.
- أحمي الجهاز من الرطوبة. مع ذلك، إذا حدث وتغلغل سائلٌ داخل الجهاز، يجب نزع البطاريات فورًا، وتجنُّب استخدامه مجددًا. في هذه الحالة، اتصلي بوكيلك المتخصص، أو أبلغينا مباشرةً.
- يمكن معرفة كيفية الوصول إلينا في نهاية شروط الضمان.
- لا تستخدمي الجهاز في حالة تلف جسم الجهاز أو أسنان المشط، أو إذا لم يكن يعمل بشكل صحيح، أو إذا سقط على الأرض، أو وقع في الماء.
- يمكنك منع وقوع حوادث أو إلحاق أضرار بالجهاز عن طريق إبقاء الجهاز وهو مُشغَّل بعيدًا عن الملابس وشعيرات الفرُّش الأخرى والأسلاك والشراط والأربطة والخيوط وما إلى ذلك.
- يعطي الجهاز أحيانًا شعورًا بالتمثيل. هذا أمر طبيعي وغير ضار أبدًا.
- نظِّفي مشط القمل بعناية بعد كل استخدام، خاصةً في حالة علاج عدة أشخاص، لتقليل خطر انتقال العدوى.
- أوقفي تشغيل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- ضعي دائمًا الغطاء الواقي ❹ على الجهاز، عندما لا يكون قيد الاستخدام.

- المحتويات الموردة والتعليق**
- يُرجى التَحَقُّق أولاً من اكتمال محتويات الجهاز، وعدم وجود أي تلف به. في حالات الشك، لا تشغل الجهاز وتوجه به إلى وكيلك أو مركز الخدمة الذي تتبع له.
- تتكوَّن المحتويات المُورَّدة من:

- 1 مشط القمل الكهربائي **LC 860** من **medisana** مع فرشاة تنظيف
- 1 بطارية 1,5 فولت (بحجم AA، من نوع LR6)
- 1 دليل استخدام

عبوات التغليف قابلة لإعادة الاستخدام، أو يمكن إعادةتها إلى دورة المواد الخام. يرجى التخلص السليم من مواد التغليف التي لم تعد تستخدمها. إذا لاحظت تلفًا ناجمًا عن النقل في أثناء فك التغليف، يرجى الاتصال بوكيلك فورًا.

--

ما هو قمل الرأس؟

قمل الرأس عبارة عن حشرات صغيرة بلا أجنحة، تتغذى على الدم الموجود على رؤوس الأشخاص. يبلغ طول القمل البالغ عادةً 2-3 مم، ويتكاين لونه من الأبيض الرمادي إلى البني. أما بيض قمل الرأس فلونه بني-بيج، ويلتصق بمنبت الشعر في فروة الرأس. يقفص قمل الرأس بعد 7-10 أيام، ويُسقى القشر الأبيض المتبقي بيض القمل. يشمل متوسط الإصابة 10 قملات تقريبًا. فإذا لم تُتخذ أي تدابير مضادة، يمكن أن ينمو العدد بسرعة إلى ما يصل إلى 200 قملة على رأس واحد. لا يستطيع قمل الرأس القفز أو الطيران، ومن ثم يُغيَّر المُضيف من خلال الاتصال المباشر من الرأس إلى الرأس. ومع ذلك، لا يمكن منع بقاء القمل على المنسوجات على المدى القصير. يتواجد قمل الرأس خُلفًا للاعتقاد السائد؛ في جميع أنواع الشعر، وليس فقط الشعر غير المغسول أو المتشخ.

خصائص مشط القمل الكهربائي LC 860 من medisana

يقضي مشط القمل الكهربائي **LC 860** من **medisana** على قمل الرأس بشكل فعال، دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية. يعمل بواسطة خلق جهد كهربائي بين الأسنان، فيقتل البيض والقمل فور ملامسته. الجهد الكهربائي منخفض جدًا، بحيث لا يلاحظه المستخدم، وغير ضار تمامًا. يُشار إلى نشاط المشط في الوقت نفسه عن طريق طنين.

يُشغَّل بطاريات AA المتداولة.

مشط القمل الكهربائي **LC 860** من **medisana** مناسب أيضًا للبالغين والأطفال فوق سن 3 سنوات. المشط مناسب أيضًا للاستخدام على الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط.

الاستخدام
وضع/خلع البطارية
أحرصى على مراعاة (LR6) من نوع AA اخلي غطاء حبيرة البطارية ❷ وضعي البطارية المرفقة (بحجم اتجاه تركيب (+/-) البطارية، على النحو الموضح على البطارية وفي داخل حبيرة البطارية. أعدي تركيب غطاء حبيرة البطارية ❷. اتبعي الخطوات نفسها عند تغيير البطارية. يُوصى بعدم استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن. اخلي البطاريات من الجهاز، إذا لم ترغبى في استخدامه لفترة طويلة نسبيًا

--

التنظيف والعناية

- يضمن التنظيف المنتظم والصيانة الجيدة الحصول على نتائج مثالية وإطالة عمر جهازك.
- نظّفي مشط القمل بعناية بعد كل استخدام، خاصةً إذا استُخدم على أشخاص مختلفين.
- اخلي البطاريات، قبل تنظيف الجهاز.
- استخدمي منديلًا ورقيًا ناعمًا وجافًا أو قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف جسم الجهاز، واستخدمي فرشاة التنظيف المرفقة ❷ لتنظيف أسنان المشط.
- لا تستخدمى موادًا تؤدي إلى التآكل، مثل سائل الكشط أو غير ذلك من وسائل التنظيف. لأن ذلك قد يضرر بالسطح الخارجي.
- لا تعمري الجهاز في الماء أبدًا لغرض تنظيفه. كما لا يجوز أن يدخل ماء إلى الجهاز.
- لا تُعرّضي الجهاز إلى أشعة الشمس المباشرة، وأحميه من الانساختات والرطوبة.
- اخلي البطاريات من الجهاز، إذ لم ترغبى في استخدامه لفترة طويلة نسبيًا. حيث ينطوي الأمر على خطر تعرض البطاريات للتسريب.
- أخفظي الجهاز في مكانٍ نظيفٍ وجافٍ وبارد.

ملاحظات حول التخلص من المنتج
لا يجوز التخلص من هذا الجهاز بإلقائه ضمن القمامة المنزلية. القطع المعدنية فيه قابلة لإعادة الاستخدام، أو يمكن إعادةتها إلى دورة المواد الخام. تخلص من أي جهاز لم تُعد بحاجة إليه، لدى أحد مراكز التجميع في مدينتك؛ لكي يتسنى التخلص منه على نحو ملائم للبيئة.
للتخلص من هذا الجهاز، يرجى التوجه إلى السلطات المحلية أو وكيلك. اخلع البطاريات، قبل التخلص من الجهاز. لا تُلقِ البطاريات المستعملة في النفايات المنزلية، بل في النفايات الخطرة أو مركز تجميع بطاريات في المتجر المتخصص.

--

شروط الضمان والإصلاح
لا تُفَعَّد حقوقك القانونية في الضمان بفعل ضمانتنا الموضَّح فيما يلي. في حالة طلب تفعيل الضمان، يرجى التوجه إلى المتجر المُتخصص الذي تتعامل معه أو إلى مركز الخدمة مباشرةً. إذا تعين إرسال الجهاز، يُرجى ذكر العطل وإرفاق نسخة من إيصال الشراء. عندئذ تسري شروط الضمان التالية:

- يتم منح منتجات **medisana** ضمانً لمدة 3 سنوات بدءًا من تاريخ البيع. يتعين إثبات تاريخ البيع، في حالة طلب تفعيل الضمان، من خلال تقديم إيصال الشراء أو الفاتورة.
- تُعالَج أيُّ أوجه قصور ناتجة عن عيوب في الخامات أو التصنيع مجانًا خلال فترة الضمان.
- الخدمة المقدمة في إطار الضمان لا ينشأ عنها إبطالة لفترة الضمان، سواءً للجهاز أو للأجزاء المستبدلة.
- يُستثنى من الضمان ما يلي:
 - جميع الأضرار الناجمة عن التعامل غير السليم، بسبب عدم اتباع دليل الاستخدام على سبيل المثال.
 - الأضرار التي يرجع سببها إلى أعمال الإصلاح أو التدخلات من جهة المشتري أو طرف ثالث غير مصرح له.
 - أضرار النقل التي نشأت في طريق التوريد من جانب الجهة المصنعة إلى المستهلك، أو عند الإرسال إلى مركز خدمة العملاء.
 - أجزاء الكماليات التي تخضع للهالك العادي.

- لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار اللاحقة المباشرة أو غير المباشرة التي يسببها الجهاز، حتى إذا تم الإقرار بأن التلف الذي سبب هذه الأضرار مشمول بالضمان.

--

يمكن العثور على عنوان مركز الخدمة في الورقة المنفصلة المرفقة.

--

يمكنك العثور على الإصدار الحالي لدليل المستخدم هذا عبر

www.medisana.com

TR/AR

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--